

## **Instalación de la pila:**

- 1) Abrir la caja por la pila
- 2) Colocar dos 1,5V “AAA” pilas “alkaline”
- 3) Cambiar las pilas en caso de que la luz sea tenue/opaca

## **Alcohol test:**

- 1) Pulsar “POWER”, la luz roja y amarilla destellara.
- 2) Pulsar “POWER” hasta aparece “LED – verde”
- 3) Esperar 5segundos – soplar en la apertura

A: Luz verde = seguro, debajo de 0,02%

B: Luz amarilla = advertencia (0,02%)

C: Luz roja y amarilla = riesgo, sobre de 0,05%